



Conector fácil de usar (estéril en el envase) para un agarre ergonómico y una técnica sin tocar. Se conecta a un tubo de extensión o a una bolsa colectora de orina.

Activación instantánea: incluye su propia solución salina estéril, una ligera presión y está lista para usar.

Diseño discreto.

El envase externo sirve al mismo tiempo como una bolsa desechable después del uso.

Orificios suaves.

Fabricado sin PVC, plastificantes ni látex.



Todas las sondas LoFric están revestidas con la exclusiva Tecnología de Superficie Urotonic™. Esto garantiza que la sonda se mantenga cómoda y segura, tanto durante la inserción como en la retirada.

Indicaciones

La sonda/el catéter vesical de un solo uso LoFric® Sense™ para mujeres está indicada/o para el sondaje vesical intermitente.

Esterilización y vida útil

Todas las sondas se esterilizan por radiación. El periodo de vida útil se encuentra impreso en el envase.

Envase

Envase individual desplegable. 30 sondas por caja. 4 cajas por caja de envío.

Composición del material

Revestimiento de superficie hidrofílica: polivinilpirrolidona (PVP).

Sonda: elastómero a base de poliolefina (POBE).

Bolsa humectante: lámina de tereftalato de polietileno (PET), aluminio y polietileno (PE). Agua estéril con cloruro sódico (NaCl).

Envase del artículo: lámina de poliéster con óxido de aluminio (PET/Alox), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), lámina de aluminio.

Línea de productos

Código	Tipo	Longitud	Tamaño
416 08 86	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 08
416 10 86	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 10
416 12 86	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 12
416 14 86	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 14



Caja dispensadora fácil de usar y almacenar.

LoFric® Sense™


Instrucciones

Información importante


Asegúrese de que se proporciona al usuario una formación adecuada sobre el procedimiento de sondaje.

Lávese las manos con agua y jabón.


Es un producto de un solo uso. Una vez utilizado, el revestimiento de la superficie se deteriorará y la sonda dejará de ser estéril. Use solo la solución salina incluida para humedecer la sonda.

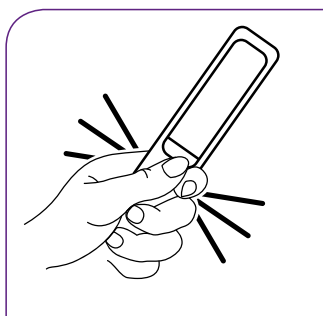


1. Apriete y rompa el paquete de agua para mojar la sonda antes de usarla.

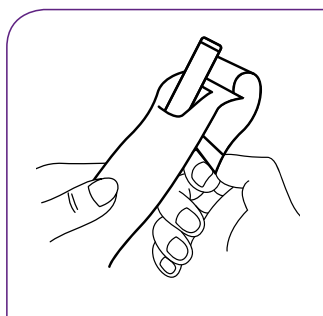

2a. Apertura desplegable.

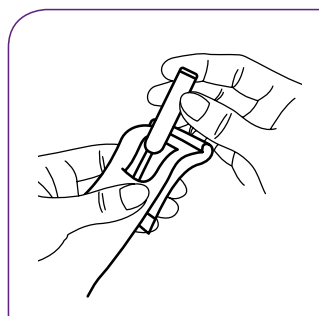

2b. Mantenga la pestaña en su lugar y retire la sonda.

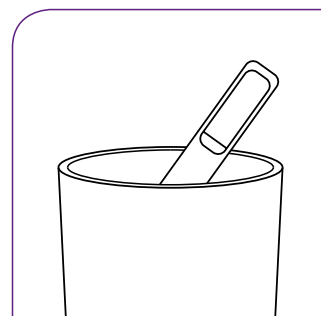

3. El envase externo sirve al mismo tiempo como una bolsa desechable higiénica y discreta.

Distribuidor en Argentina:

Droguería Luma SA.
Dirección: Pringles 2707,
CP 1678 Caseros - Buenos Aires, Argentina
Teléfono/Fax: (5411) 4734-7174 / 7175
info@droguerialuma.com.ar, www.droguerialuma.com.ar